

ポケット尿比重屈折計 Cat.No.4409

PAL-09S



ポケット尿比重屈折計PAL-09Sは、尿比重をカンタン操作でデジタル表示します。
コンパクトなサイズで重さもわずか100g。現場で素早く測定することができます。

●特長●

- 水で基準合わせが可能
- 測定時間はわずか3秒
- 片手で操作できる先進デザイン
- わずか100gの軽量タイプ
- 携帯に便利なストラップを取付可能
- 水で丸洗いできる防水仕様(IP65)
- 保管用ケース付き
- 電池残量表示機能付

●活用先の例●

- * 病院の臨床検査室で
- * 臨床検査センターで
- * 病院の入院病棟(泌尿器科)で
- * 救急・時間外診療時の検査において
- * 尿の濃さの管理・チェック時に
- * 医院・診療所で
- * 集団検診センターで

●主な仕様●

測定項目：尿比重、温度
測定範囲：尿比重 1.000~1.100 (自動温度補正)、温度10.0~35.0℃
分解能：尿比重 0.001、温度0.1℃
測定精度：尿比重 ±0.002、温度1℃
温度補正：10~35℃
電源：単4アルカリ電池×2
電池寿命：約11,000回測定
防水保護等級：JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65
寸法・重量：5.5×3.1×10.9cm 100g(本体のみ)



実物大



●測定方法●



①プリズム面にサンプルを滴下します。



②STARTキーを押します。



③約3秒後に尿比重を表示します。

●尿比重目盛について●

1979年に日本臨床病理学会標準化委員会(J.S.C.P.)で作成された目盛を採用しています。

※尿以外の液体の比重値とは一致しませんので、ご注意ください。

アタゴの屈折計は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本でなっています。

HACCP GMP GLP

アタゴ製品はHACCP、GMPおよびGLPシステムに適合できます。

※本器の外観及び仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

株式会社 **アタゴ**

本社/東京都板橋区本町32-10 (〒173-0001)
TEL: 03-3964-6131 FAX: 03-3964-6137
http://www.atago.net/ eigyo@atago.net

関西支店/兵庫県神戸市中央区港島中町4-1-1 ポートアイランドビル3階
TEL: 078-954-7651 FAX: 078-302-8856
深谷工場/埼玉県深谷市小前田501 修理サービス部(修理窓口)
TEL: 048-581-8063 FAX: 048-581-7792

ATAGO U.S.A., Inc.

ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.

ATAGO (THAILAND) Co., Ltd.

ATAGO BRASIL Ltda.

ATAGO ITALIA s.r.l.

ATAGO CHINA Guangzhou Co., Ltd.

