

ポケット犬猫尿比重屈折計

PAL-犬猫尿比重


Cat. No. 4529



犬猫の尿比重をカンタン・安全に測定できます。
表示はデジタルで見やすく、重さはわずか100gです。
操作は片手でOKなのでどこでも気軽にお使いいただけます。

特長

- 水で基準合わせが可能
- 水で丸洗いできる防水仕様 (IP65)
- 測定時間はわずか3秒
- 保管用ケース付き
- 携帯に便利なストラップを取付可能
- 電池残量表示機能付

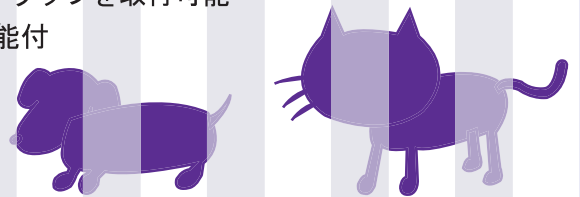

主な仕様

測定範囲	尿比重(犬) 1.000~1.060 (自動温度補正) 尿比重(猫) 1.000~1.080 (自動温度補正) 温度 10.0~35.0°C
分解能	尿比重 0.001・温度 0.1°C
測定精度	尿比重 ±0.001・温度 ±1°C
温度補正	10~35°C
環境温度	10~35°C
サンプル量	0.3mℓ
電 源	単4アルカリ電池×2本
電池寿命	約11,000回測定(アルカリ乾電池使用時)
防水保護等級	JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65
寸法・重量	5.5×3.1×10.9cm 100g(本体のみ)

※実物大



¥31,000(税別)

測定方法



①プリズム面にサンプルを滴下します。



②STARTキーを押します。



③約3秒後に尿比重を表示します。

目盛について

主に米国で用いられている犬用、猫用の尿比重目盛を採用しています。犬尿を測定する場合は-d-の目盛、猫尿の場合は-C-の目盛に切り替えてください。STARTキーの長押しで切り替えができます。

※尿以外の液体の比重値とは一致しませんのでご注意ください。

アタゴの屈折計は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本でなっています。

HACCP GMP GLP アタゴ製品はHACCP、GMPおよびGLPシステムに適合できます。

株式会社 **アタゴ**

本社/東京都板橋区本町32-10 (〒173-0001)
TEL: 03-3964-6131 FAX: 03-3964-6137
http://www.atago.net/ eigyo@atago.net

関西支店/兵庫県神戸市中央区港島中町4-1-1 ポートアイランドビル3階
TEL: 078-954-7651 FAX: 078-302-8856
深谷工場/埼玉県深谷市小前田501
TEL: 048-581-7788 FAX: 048-581-3686



※本器の外観及び仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

ATAGO U.S.A., Inc.

ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.

ATAGO (THAILAND) Co., Ltd.

ATAGO BRASIL Ltda.

ATAGO ITALIA s.r.l.

ATAGO CHINA Guangzhou Co., Ltd.