

ポケット犬猫尿比重屈折計

PAL-犬猫尿比重



Cat. No. 4529



犬猫の尿比重をカンタン・安全に測定できます。
表示はデジタルで見やすく、重さはわずか100gです。
操作は片手でOKなのでどこでも気軽にお使いいただけます。

特長

- 水で基準合わせが可能
- 水で丸洗いできる防水仕様 (IP65)
- 測定時間はわずか3秒
- 保管用ケース付き
- 携帯に便利なストラップを取付可能
- 電池残量表示機能付

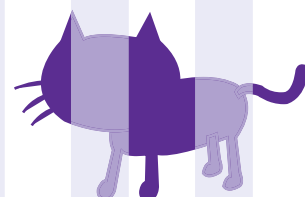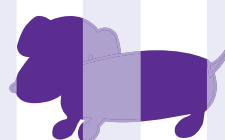

主な仕様

測定範囲	尿比重(犬) 1.000~1.060 (自動温度補正) 尿比重(猫) 1.000~1.080 (自動温度補正) 温度 10.0~35.0℃
分解能	尿比重 0.001・温度 0.1℃
測定精度	尿比重 ±0.001・温度 ±1℃
温度補正	10~35℃
環境温度	10~35℃
サンプル量	0.3ml
電源	単4アルカリ電池×2本
電池寿命	約11,000回測定 (アルカリ乾電池使用時)
防水保護等級	JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65
寸法・重量	5.5×3.1×10.9cm 100g(本体のみ)

※実物大



¥33,500 (税別)

測定方法



① プリズム面にサンプルを滴下します。



② STARTキーを押します。



③ 約3秒後に尿比重を表示します。

目盛について

主に米国で用いられている犬用、猫用の尿比重目盛を採用しています。犬尿を測定する場合は-d-の目盛、猫尿の場合は-C-の目盛に切り替えてください。STARTキーの長押しで切り替えができます。
※尿以外の液体の比重値とは一致しませんのでご注意ください。

アタゴの屈折計は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本で行なっています。

株式会社 アタゴ

<http://www.atago.net/> eigyo@atago.net

ATAGO U.S.A., Inc.
ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.
ATAGO THAILAND Co., Ltd.
ATAGO BRASIL Ltda.
ATAGO ITALIA s.r.l.
ATAGO CHINA Guangzhou Co., Ltd.
ATAGO RUSSIA Ltd.

本社 / 〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-3 芝公園フロントタワー 23階
関西支店 / 〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町4-1-1 ポートアイランドビル 10階
九州支店 / 〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-4-27 福岡AIビル 8階
深谷工場 / 〒369-1246 埼玉県深谷市小前田501

TEL: 03-3431-1940 FAX: 03-3431-1945
TEL: 078-954-7651 FAX: 078-302-8856
TEL: 092-833-3033 FAX: 092-833-3034
TEL: 048-581-7788 FAX: 048-581-3686

HACCP GMP GLP
アタゴ製品は HACCP, GMP, および GLP システムに適合できます。



※製品の的外観および仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。